

Fakta

CDK: Permanent kateter, Symetrex LT- Rett

Produktnavn	Symetrex LT
Bruksområde	Hemodialyse
Reparasjonssett	Nei

Beskrivelse	<p>Permanent sentralt dialysekateter til voksne. Dobbellumen med symmetrisk kateterspiss som gjør at Symetrex ikke har noe spesifikt arterie- eller veneløp. Svært lav resirkulasjon, lavere enn 1 % uavhengig av flowretning. Kateterspissens konstruksjon gir minimal arteriell insufficiens. Den symmetriske kateterspissens design og at kateteret er uten sidehull, minimerer lekkasje av kateterlås.</p>
Materiale	Myk polyuretan
Lengde/Størrelse	Leveres i ulike lengder. Størrelse 15,5 F. Merk at lengdeangivelse ikke er fra cuff til kateterspiss, men hele kateterlengden til hub.
Design	Double D Θ
Holdbarhet	År, det kan ligges å lenge det er behov.
Sterilisering	EO
Pakningsinnhold	Basic- sett inneholder: kateter, introducernål, guidewire, 2 dilatorer, tunnelerer, delingsbar introducer, 2 propper
Produsent	Medcomp®
Innleggingsteknikk	Antegrad tunnelering med Seldingerteknikk. Kateterets spiss anbefales å ligge i høyre forkammer. Ved innleggelse i femoralis, skal kateterspissen ligge i krysningen vena iliaca og vena cava inferior.
Fakta	For mer informasjon, innlegging etc, se Medcomps hjemmeside Medcompnet.com