

Användbar information för vårdgivare

SecurAcath Subcutaneous Anchor Securement System (SASS) är en revolutionerande ny metod för kateterförankring som inte kräver suturer eller häfta. Den unika designen av SecurAcath fäster precis vid insättningsstället med hjälp av små, flexibla fästfötter placerade i den subkutana vävnaden precis under huden.

SecurAcath har många fördelar som gör katetervården mycket enklare och minskar kateterkomplikationer. SecurAcath sitter under hela kateterns livslängd och kan:

- Avesvärt minska risken för kateterrelaterade infektioner
- Dramatiskt minska katetermigration, förskjutning och rubbat läge
- Minska kostnaderna för kateterbyte
- Förbättra effektiviteten vid förbandsbyte och omläggning
- Förhindrar kateterassocierad hudskada (CASI)

Din mottagning kanske träffar patienter med SecurAcath. Vi vill ge några värdefulla tips och verktyg att ta med och sprida till dina kollegor som handhar PICC-line.

Nedan hittar du länkar till information och instruktionsfilmer. Önskar du mer information eller har några frågor är du välkommen att kontakta info@nordicmedcom.se.

Nyckelpunkter som alla vårdgivare som handhar PICC-line bör känna till:

- Förankrar katetern under hela dess livslängd, från inläggning tills dess att katetern tas bort.
- Vid rengöring av exit-site vid omläggning, lyft SecurAcath som ett gångjärn, rengör 360 grader runt exit-site med desinfektionsmedel, låt torka helt och applicera förband enligt lokal rutin. Det finns inget behov att öppna SecurAcath vid rengöring.
- Kompatibel med all förband och klorhexidin-diskar.
- Det finns två borttagningstekniker, dela eller vika. Utför inga moment som du inte är utbildad att göra. Videolänkarna nedan visar de båda teknikerna för borttagning.
- Appen är gratis och ger bekväm åtkomst till träningsvideor.
- Patienter bör få en patientinformationsguide. Vid frågor kontakta ansvarig vårdgivare.

Vi ser fram emot att tillsammans med Er förbättra patientvården med SecurAcath.

SecurAcath Info & Videos:



SecurAcath
Webbsida



SecurAcath
Metodvideor



SecurAcath
Information vård och
borttagning



Patientinformationsguide



181 Cheshire Lane, Suite 100
Plymouth, MN 55441 USA
+1.763.225.6699



Download the
SecurAcath® App

