
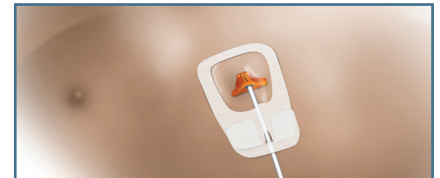
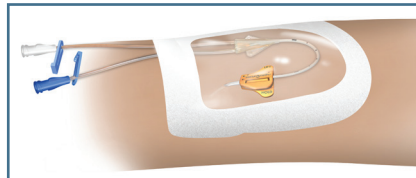


STEG SJU

När förband har applicerats enligt klinikens rutin, se till:

- Att inte applicera drag på förbandet vid applicering/omläggning.
- Att förbandets kanter är helt i kontakt med huden och förseglade.
- Att stabilisera katetervingarna/hub på kateter för vasculär åtkomst, eller minst 2 cm av kateterkroppen på dräneringskateterar läggs under förbandet för att förhindra att katetern dras/knickas distalt från SecurAcath.

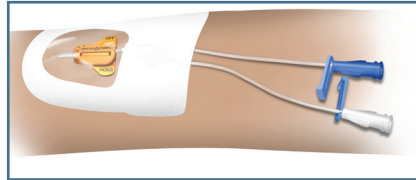

Ladda ner
SecurAcath®
App

Gå till www.securacath.com för mer information



interrad
MEDICAL

181 Cheshire Lane, Suite 100
Plymouth, MN 55441 USA
+1.763.225.6699


Placera katetern enligt klinikens protokoll, lämna 3 cm utanför införingsstället. SecurAcath kräver 3 cm kateterskaft för att fästas på katetern. Den bakre delen av SecurAcath-enheten bör inte placeras bortom nollmärket på katetern eller närmare än 1 cm från kateternavet (hub).

Välj lämplig storlek på SecurAcath-enheten för att matcha kateterdiametern. Om katetern är märkt med halv French, använd närmaste mindre storlek på SecurAcath, t.ex. med 8,5F kateter, använd 8F SecurAcath.



STEG ETT

- Vik basen nedåt så att fästfötterna möts.
- Lyft katetern för att synliggöra införingsstället.
- Applicera ett drag på huden för att vidga införingsstället.
- Använd tippen på en dilator för att vidga hudöppning vid behov.
- Kateterns ledare kan sitta kvar tills SecurAcath är på plats.

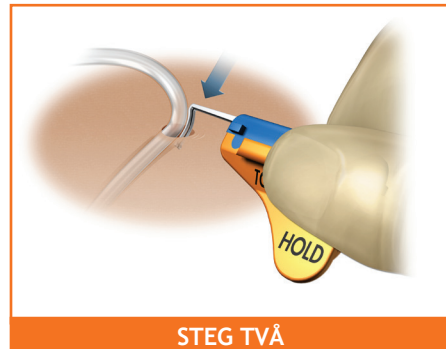


STEG TVÅ

- Håll den vikta basen i vinkel med huden och rikta fästfötterna mot införingsstället.
- För in fästfötterna i införingsstället och för några millimeter in i subkutan vävnad.
- Medan basen är vikt, rikta in den till önskad riktning (samma riktning som katetern).



STEG TRE

- Släpp basen så att den kan öppnas tills den är platt.
- Dra försiktigt tillbaka basen för att vara säker på att det finns en del subkutan vävnad mellan fästfötterna och dermis.

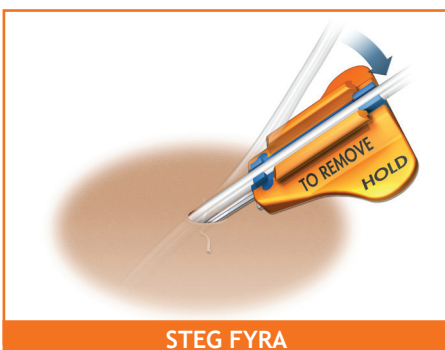

STEG FYRA

- Använd sterila kompresser för att avlägsna blod, ultraljudsgel eller andra vätskor från katetern.
- Se till att katetern och basen är rena och torra.
- Rikta in katetern med spåret på basen och tryck in katetern i spåret.



STEG FEM

- Placera locket på basen genom att trycka hårt mot mitten och sedan kanterna medan du håller i basen.
- Kontrollera att locket är helt fastsatt på basen.
- Inget mellanrum ska vara synligt mellan locket och basen.



STEG SEX

- Släpp basen så att den kan öppnas tills den är platt.
- Dra försiktigt tillbaka basen för att vara säker på att det finns en del subkutan vävnad mellan fästfötterna och dermis.

(Fortsätt på nästa sida.)