



STEG ETT

- Lyft SecurAcath från patienten.
- **Ta tag i HOLD-fliken** med ena handens tumme och pekfinger för att stabilisera vingarna på SecurAcath.



STEG TVÅ

- **Bänd uppåt vid kanten av LIFT-fliken** med den andra handen för att lossa locket från basen (som att öppna en burk läsk)
- **Undvik att vrida basen** när du tar bort locket. Vridning flyttar fästfötterna under huden och kan vara obehvämt för patienten.



STEG TRE

- **Ta bort katetern** - använd inte överdriven kraft.
- Håll trycket på plats **för att uppnå hemostas**.

## ALTERNATIV- VIKA BASEN

Kan användas med eller utan katetern på plats



STEG FYRA

- Applicera ett hårt tryck på införingsstället för att hålla vävnaden stilla.
- Vik vingarna nedåt för att föra ihop fötterna under huden.

**HJÄLPSAMMA TIPS**

- Använd kompresser indränkta i NaCl om införingsstället är fast eller om det finns en sårskorpa.
- Ett analgetikum kan användas för att bedöva platsen för att eliminera obehag under borttagningen om patienten är mycket smärtekänslig.
- Ett fast tryck på platsen för att hålla vävnaden på plats ger en enklare borttagning.
- Ta avsiktligt bort fötterna- följ fotens form.
- Obehag för patienten kan minimeras eller elimineras genom att fästfötterna tas bort snabbt, **utan att vrida eller tveka**.




STEG FEM

- Håll den vikta basen horisontellt mot huden.
- Använda snabba, avsiktliga uppåtgående rörelser för att ta bort efter fästfötternas form.

## ALTERNATIV- DELA BASEN

Katetern måste tas bort före detta alternativ.

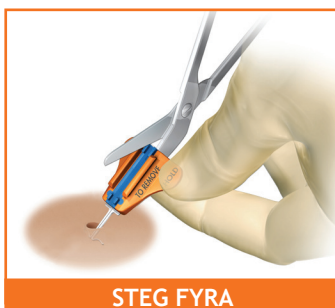

STEG FYRA

- Använd en sax med trubbig spets för att klippa basen helt på mitten på längden längs det blå spåret, samtidigt som du håller vingarna stadigt.
- Vridning kommer att leda till obehag så ett säkert stadigt snitt är viktigt.



STEG FEM

- Tryck hårt på införingsstället med en hand.
- De flexibla fästfötterna är formade som "L" med fötter som sträcker sig 5 mm till varje sida av införingsstället.



STEG SEX


- Vrid den blå kanten uppåt och använd en **snabb, avsiktlig uppåtgående** rörelse för att ta bort varje fot separat. Följ fotens form samtidigt som du **håller greppet på huden** nära införingsstället.



VALFRITT


- Om du möter överdrivet motstånd, håll ett hårt tryck över foten med ett finger vid införingsstället.
- Dra foten mot trycket från fingret för att rita ut den flexibla foten när du drar förbi motståndet.
- Fästfoten av Nitinol är designad att flexa ut från platsen utan att orsaka vävnadsskada.

## OMLÄGGNING

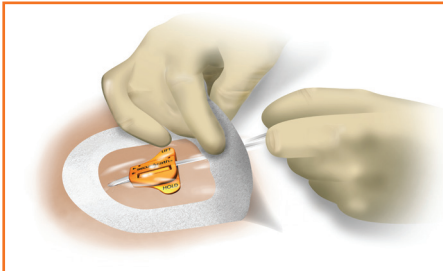


TA BORT DET GAMLA FÖRBANDET

- Ta bort det gamla förbandet samtidigt som du stabiliserar SecurAcath för att undvika obehag för patienten.

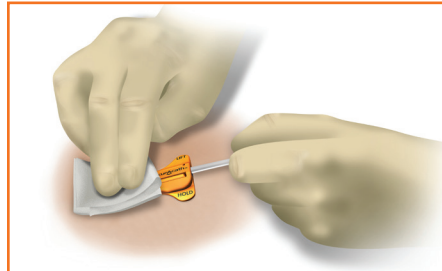

NOGGRANN RENGÖRING AV ENHETEN

- Om det finns blod på SecurAcath, använd kompresser med koksaltlösning för att lösa upp och ta bort blod.
- SecurAcath är en förseglad enhet. Ta inte bort enhetens lock för rengöring.

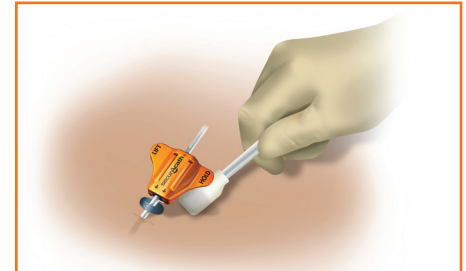

RENGÖR INFÖRINGSSTÄLLET

- Lyft försiktigt katetern och SecurAcath-enheten för att rengöra runt kateterens införingsställe.
- Använd antiseptiskt medel för att rengöra 360 grader runt om.
- Dra inte i, vrid eller rotera inte enheten från dess ursprungliga position medan du rengör införingsstället.




LÅT TORKA

- Håll katetern borta från huden och låt rengöringsmedlet torka helt.
- Vänd eller vrid inte SecurAcath från dess ursprungliga position.



APPLICERA NYTT FÖRBAND

- Antimikrobiella diskar och vävnadslim kan användas med SecurAcath. Placera disken genom att lyfta SecurAcath och skjuta skåran runt katetern och SecurAcath-benen. Följ tillverkarens instruktioner för korrekt applicering av din specifika produkt.
- Täck införingsstället, SecurAcath och den yttre delen av katetern med transparent förband.
- Sträck inte det transparenta förbandet hårt. placera förbandet runt enhetens kanter utan spänning.
- Om förbandet appliceras för hårt kan det skapa tryck på SecurAcath och orsaka obehag för patienten.

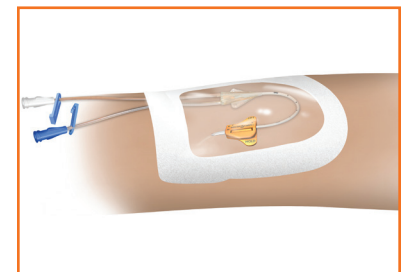

KATETERVINGAR

- Ibland kan katetern ha flera centimeter exponerade utanför SecurAcath.
- Var noga med att stabilisera katetervingar/hub på vasculära åtkomster, eller minst 2 cm av kateterkroppen på dränage under förbandet för att förhindra att katetern vrids eller knickas distalt om SecurAcath.
- Förbandet arbetar tillsammans med SecurAcath för att förhindra överdriven spänning på katetern.



Ladda ner  
SecurAcath® App

Gå till [www.securacath.com](http://www.securacath.com) för mer information



**interrad**  
MEDICAL

181 Cheshire Lane, Suite 100  
Plymouth, MN 55441 USA  
+1.763.225.6699